

serf *extremity*

F.A.S.T.[®]

Foot & Ankle Surgery Technologies



TECHNIQUE OPÉRATOIRE
TOE FAST[®]

1

RÉSECTION ARTICULAIRE



Griffe d'orteil.



1

Réséquer les surfaces articulaires de phalanges proximales et distales.

2

PRÉPARATION DE LA PHALANGE PROXIMALE



Repérer le centre
de la surface.

1

Préparer le fût centro-médulaire de **manière croissante** à l'aide
du compacteur en **commençant par la taille S et jusqu'à la butée**.

Attention ne pas rechercher l'appui cortical, rester en spongieux.



3

PRÉPARATION DE LA PHALANGE DISTALE



1

Repérer le centre de la surface.



2

Préparer le fût centro-médulaire de **manière croissante** à l'aide du compacteur en **commençant par la taille S et jusqu'à la butée**.

Attention ne pas rechercher l'appui cortical, rester en spongieux.

4


MISE EN PLACE DES IMPLANTS

1

En premier, insérer **manuellement** avec le tournevis mâle l'**implant femelle** dans la préparation de la **phalange proximale**.




Il est important que l'implant soit bien positionné :

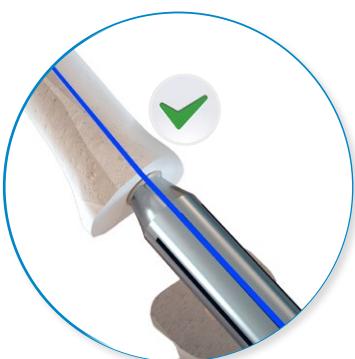

Soit l'implant est **affleure de la coupe**.



Soit l'implant est **débordant**.

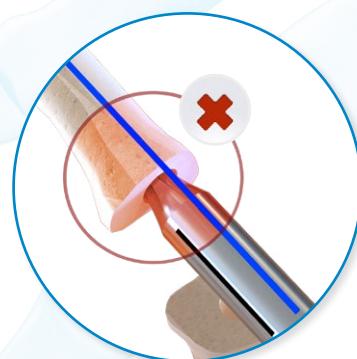

l'implant ne doit **pas être plus bas que la coupe**.



SIZE M

2

Dans un **second temps**, insérer **manuellement** avec le **tournevis femelle**, l'implant mâle dans la préparation de **phalange distale**.

3



Stopper le vissage lorsque le **tournevis** est en contact avec la coupe.
Positionner l'un des repères du tournevis soit vertical ou horizontal.

4



Il est très important que les empreintes des pièces mâle et femelle soient alignées.

5

RÉDUCTION

1



Rechausser la phalange distale sur la phalange proximale, **jusqu'à entendre le clip**.
Si le clippage ne se fait pas, dévisser légèrement la pièce proximale.



click

IMPLANTS

IMPLANTS

LIBELLÉ

GS1

Toe F.A.S.T.® Taille S	3663165004817
Toe F.A.S.T.® Taille M	3663165004824
Toe F.A.S.T.® Taille L	3663165004831



ANCILLAIRE


KIT TOE F.A.S.T.®

Réf. VASETFM

LIBELLÉ

GS1

Panier Toe F.A.S.T.®	3663165004930
Couvercle Toe F.A.S.T.®	3663165004947
Tournevis Mâle Taille S	3663165004848
Tournevis Mâle Taille M	3663165004855
Tournevis Mâle Taille L	3663165004862
Tournevis Femelle Taille S	3663165004879
Tournevis Femelle Taille M	3663165004886
Tournevis Femelle Taille L	3663165004893
Compacteur Taille S	3663165004909
Compacteur Taille M	3663165004916
Compacteur Taille L	3663165004923
Poignée Encliquetage A0	3663165003490

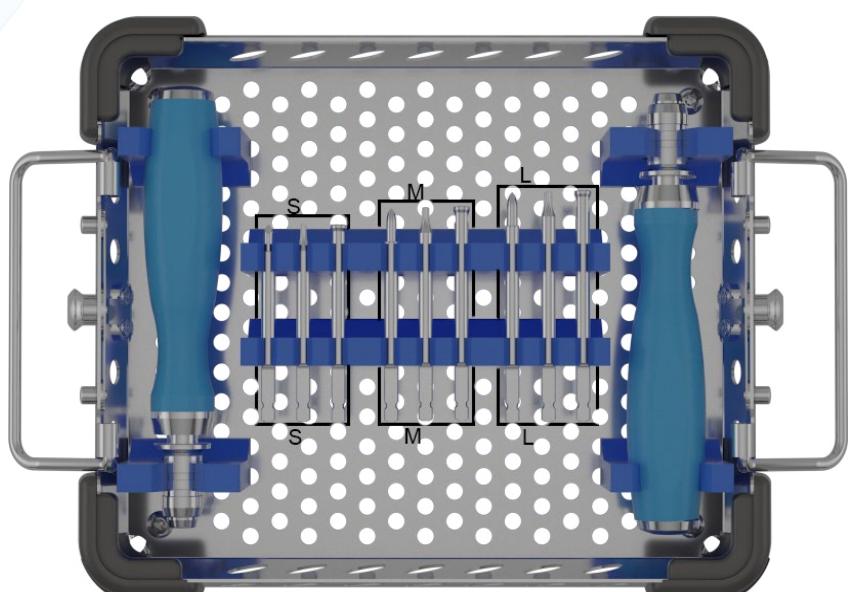

PRODUITS ASSOCIÉS

Ø 2.7



Ø 3.2



COMPRESSION

LIBELLÉ	GS1
FAST Ø 2.7 L12	3663165003728
FAST Ø 2.7 L14	3663165002165
FAST Ø 2.7 L16	3663165002172
FAST Ø 2.7 L18	3663165002189
FAST Ø 2.7 L20	3663165002196
FAST Ø 2.7 L22	3663165002202
FAST Ø 2.7 L24	3663165002219
FAST Ø 2.7 L26	3663165002226
FAST Ø 2.7 L28	3663165002233
FAST Ø 2.7 L30	3663165002240

BISEAUTÉE

LIBELLÉ	GS1
FAST Ø 2.7 L14	3663165002257
FAST Ø 2.7 L16	3663165002264
FAST Ø 2.7 L18	3663165002271
FAST Ø 2.7 L20	3663165002288
FAST Ø 2.7 L22	3663165002295
FAST Ø 2.7 L24	3663165002301
FAST Ø 2.7 L26	3663165002318
FAST Ø 2.7 L28	3663165002325
FAST Ø 2.7 L30	3663165002332
FAST Ø 2.7 L32	3663165002349
FAST Ø 2.7 L34	3663165002356
FAST Ø 2.7 L36	3663165002363
FAST Ø 2.7 L38	3663165002370
FAST Ø 2.7 L40	3663165002387

COMPRESSION

LIBELLÉ	GS1
FAST Ø 3.2 L14	3663165002486
FAST Ø 3.2 L16	3663165002493
FAST Ø 3.2 L18	3663165002509
FAST Ø 3.2 L20	3663165002516
FAST Ø 3.2 L22	3663165002523
FAST Ø 3.2 L24	3663165002530
FAST Ø 3.2 L26	3663165002547
FAST Ø 3.2 L28	3663165002554
FAST Ø 3.2 L30	3663165002561
FAST Ø 3.2 L32	3663165002578
FAST Ø 3.2 L34	3663165002585
FAST Ø 3.2 L36	3663165002592
FAST Ø 3.2 L38	3663165002608
FAST Ø 3.2 L40	3663165002615

BISEAUTÉE

LIBELLÉ	GS1	LIBELLÉ	GS1
FAST Ø 3.2 L16	3663165003742	FAST Ø 3.2 L40	3663165002714
FAST Ø 3.2 L18	3663165003735	FAST Ø 3.2 L42	3663165002721
FAST Ø 3.2 L20	3663165003360	FAST Ø 3.2 L44	3663165002738
FAST Ø 3.2 L22	3663165002622	FAST Ø 3.2 L46	3663165002745
FAST Ø 3.2 L24	3663165002639	FAST Ø 3.2 L48	3663165002752
FAST Ø 3.2 L26	3663165002646	FAST Ø 3.2 L50	3663165002769
FAST Ø 3.2 L28	3663165002653	FAST Ø 3.2 L52	3663165002776
FAST Ø 3.2 L30	3663165002660	FAST Ø 3.2 L54	3663165002783
FAST Ø 3.2 L32	3663165002677	FAST Ø 3.2 L56	3663165002790
FAST Ø 3.2 L34	3663165002684	FAST Ø 3.2 L58	3663165002806
FAST Ø 3.2 L36	3663165002691	FAST Ø 3.2 L60	3663165002813
FAST Ø 3.2 L38	3663165002707		

www.serf.fr

serf *extremity*

85 avenue des Bruyères
69150 Décines-Charpieu
FRANCE

Tel. +33 (0)4 72 05 60 26
Fax +33 (0)4 72 02 19 18
serf.extremity@serf.fr

Tous les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont marqués CE selon la Directive 93/42/CEE et ses amendements, à moins qu'identifiés spécifiquement comme « non marqués CE ». Les dispositifs médicaux mentionnés dans ce document sont des dispositifs de classe IIb et I.

Les dispositifs médicaux de classe IIb et I sont marqués CE 0459 avec le GMED.

Avant toute utilisation d'un produit SERF, veuillez vous référer à la notice d'instructions et à la technique opératoire.

Consulter les étiquettes et notices produits pour la liste complète des indications, contre-indications, risque, avertissement, précautions et mode d'emploi.

©2021 SERF. Tous droits réservés. F.A.S.T.® et Toe FAST® sont des marques de commerce de SERF.

CE 0459



SERF
85 Avenue des Bruyères
69150 Décines-Charpieu - France
Tel. +33 (0)4 72 05 60 10

Distribué par **serf** *extremity*

Distribué par